

Informacion del paciente

BEGO PMMA Splint E –
Férula dental oclusal

Juntos hacia el éxito



Estimado/a paciente,

A continuación le ofrecemos útiles indicaciones sobre el uso, el cuidado, la limpieza y el almacenamiento de su férula dental oclusal.

La férula dental oclusal ha sido adaptada a sus necesidades individuales y es biocompatible.

Lleve su férula:

Por las noches

Todo el día

¡Esperamos que su tratamiento sea satisfactorio!

Si tiene alguna pregunta, el equipo de su consultorio estará encantado de atenderle.

Información importante

El uso regular de la férula puede provocar alteraciones funcionales (p. ej., opacidad/manchas o signos claros de desgaste). En estos casos puede ser necesaria una reparación o la fabricación de una nueva férula.

Como parte de su tratamiento debe supervisarse el estado de la férula de forma periódica mediante la evaluación de esta en el consultorio del odontólogo.



Observe las siguientes indicaciones para garantizar un funcionamiento duradero de su férula:



Utilización

Antes de la colocación de la férula:

- Cepíllese los dientes
- Aclare la férula con agua fría abundante

Durante el uso de la férula:

- No coma ni beba nada, de lo contrario la férula podría romperse



Cuidado y limpieza

Después del uso de la férula:

- Aclare la férula con agua fría abundante y limpie el interior y exterior de esta con un cepillo de dientes



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
No la limpie con:

- Pasta dentífrica o limpiadores de prótesis
- Productos de limpieza con colorantes, p. ej. enjuagues bucales
- Productos de limpieza para el hogar o productos abrasivos
- Agua hirviendo
- Aparatos de ultrasonidos y métodos de limpieza que superen los 35°C



Almacenamiento

Durante los intervalos de tiempo entre los ciclos de uso, la férula debe almacenarse en un entorno protegido de la luz, en un lugar seco a temperatura ambiente o en agua fría.



Sello del odontólogo



BEGO IBERIA, S.L.U.

Cl. Frederic Mompou, 4, Esc.A 5^o1^a · 08960 Sant Just Desvern
Barcelona, Spain · Telephone +34 933 712868

E-Mail: begoiberia.dental@bego.com · www.iberia.bego.com

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany

Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100

E-Mail info@bego.com · www.bego.com